


Notice de démontage/remontage pour nettoyage Porte-Condyle

Références associées	Désignation	Nombre de composants
B280314	Porte-condyle	2

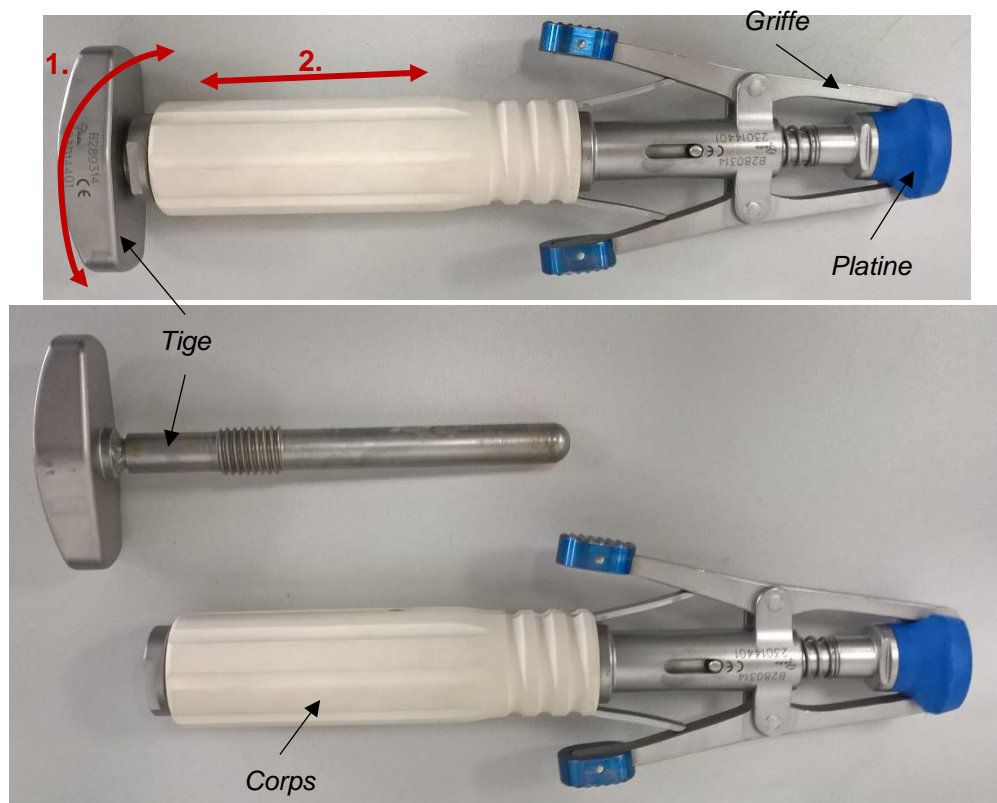

Etapas de démontage/remontage pour nettoyage


Pour le nettoyage du porte condyle, le démontage est **obligatoire** :

1. Dévisser la tige
2. La sortir du corps ;
3. Nettoyer chaque pièce séparément ;
4. Remonter le tout sans forcer.

Instruction for assembly and disassembly for cleaning

Condyle holder

Associated reference	Designation	Number of components
B280314	Condyle holder	2

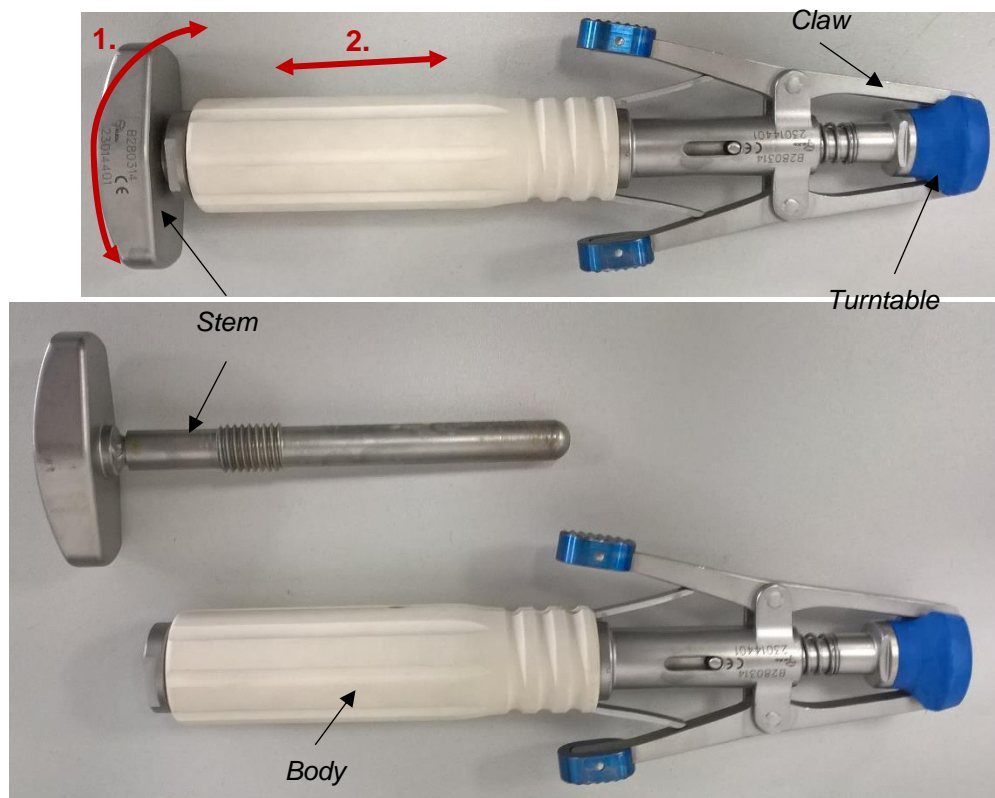

Steps for assembly/disassembly for cleaning

For the cleaning of the condyle holder, the disassembly is **obligatory**:

1. Unscrew the stem
2. Take it out the body;
3. Clean each part separately;
4. Assemble the set without force.