


## Notice de démontage/remontage pour nettoyage Impacteur / Préhenseur d'embases tibiales

Références associées	Désignation	Nombre de composants
14091701	Impacteur / préhenseur d'embases tibiales	2

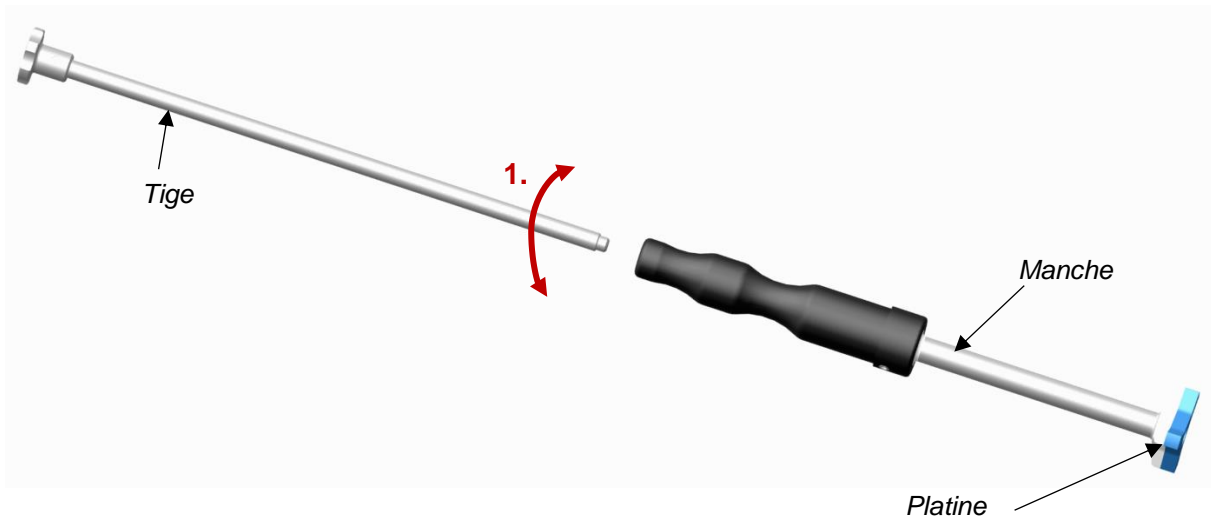

### Etapes de démontage/remontage pour nettoyage


Pour le Nettoyage de l'impacteur, le démontage est **obligatoire** :

1. Dévisser la tige du reste du corps
2. Nettoyer chaque pièce séparément
3. Remonter le tout sans forcer

## Instruction for assembly and disassembly for cleaning

# Tibial tray impactor / holder

Associated reference	Designation	Number of components
14091701	Tibial tray impactor / holder	2

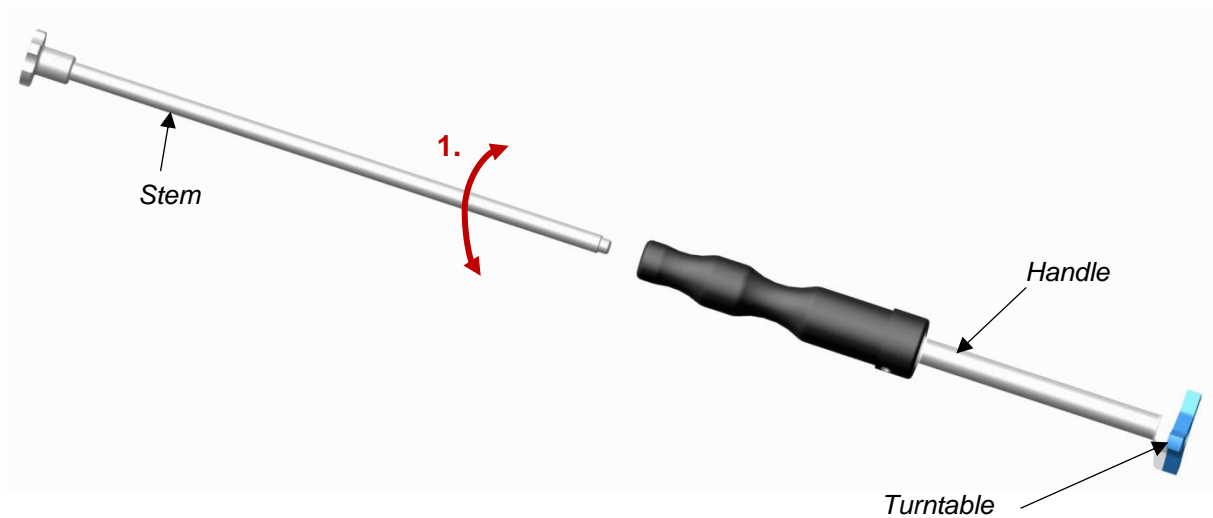

### Steps for assembly/disassembly for cleaning

For the cleaning of the impactor, the disassembly is **obligatory**:

1. Unscrew the stem from the body;
2. Clean each part separately;
3. Assemble the set without force.