


Notice de démontage/remontage pour nettoyage Impacteur / Extracteur de Condyle

Références concernées	Désignation	Nombre de composants
B2342062	Impacteur / extracteur de condyle (Taille 1 à 7)	2
B2342061	Impacteur / extracteur de condyle (Taille 1 à 6)	

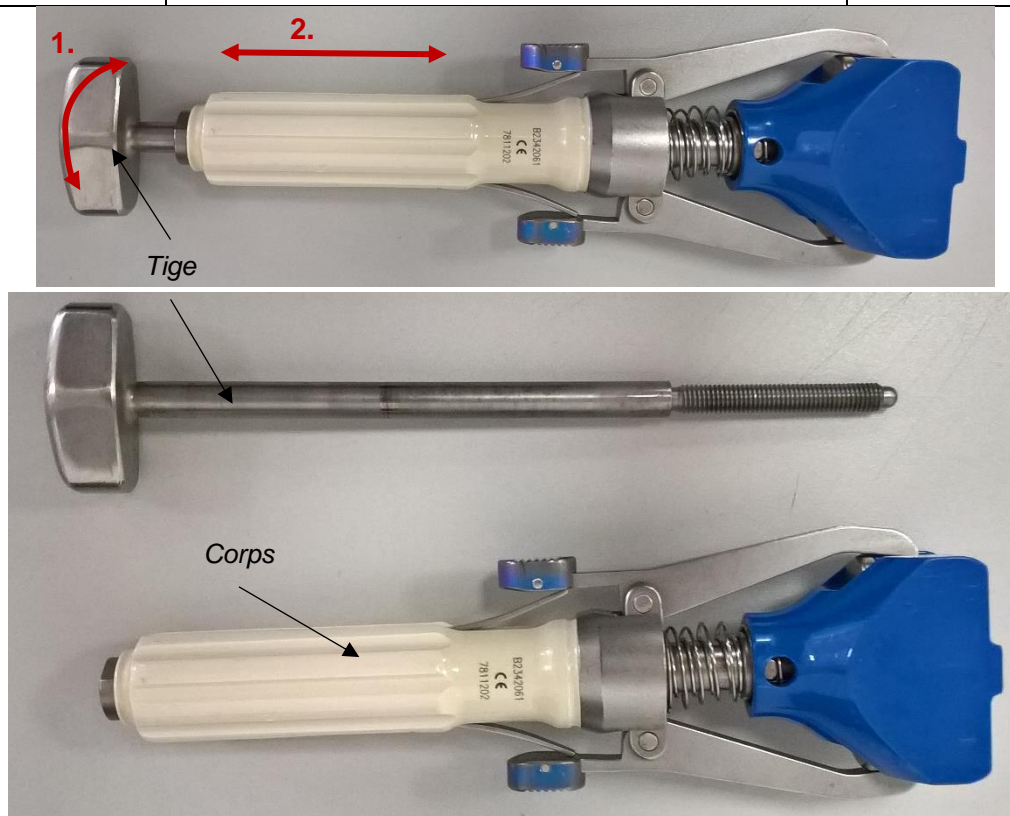

Etapes de démontage/remontage pour le nettoyage



Pour le nettoyage de l'impacteur/extracteur, le démontage est **obligatoire** :

1. Dévisser la tige
2. La sortir du corps ;
3. Nettoyer chaque pièce séparément ;
4. Remonter le tout en revissant.

Instruction for assembly and disassembly for cleaning

Condyle impactor / extractor

Associated reference	Designation	Number of components
B2342062	Condyle impactor / extractor (Size 1 à 7)	2
B2342061	Condyle impactor / extractor (Size 1 à 6)	

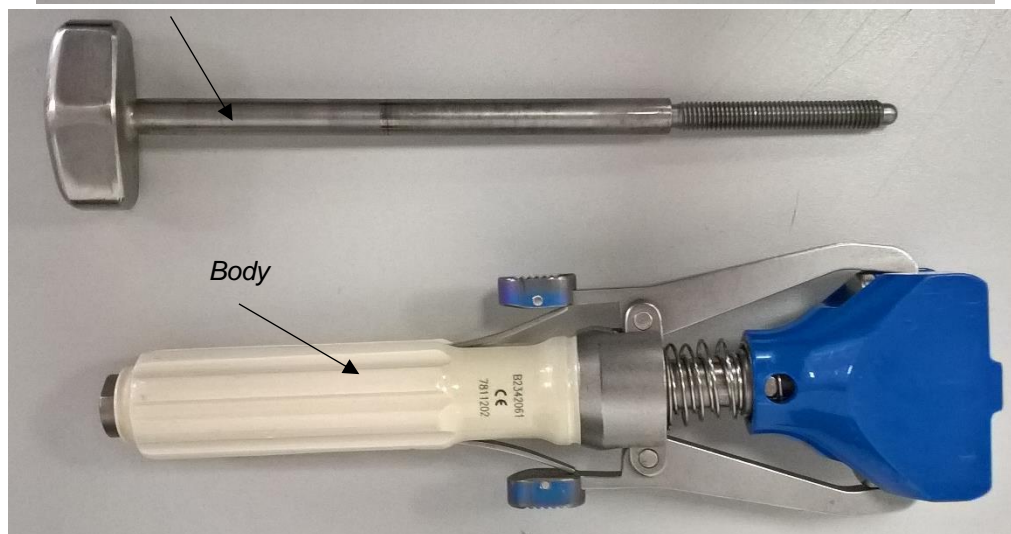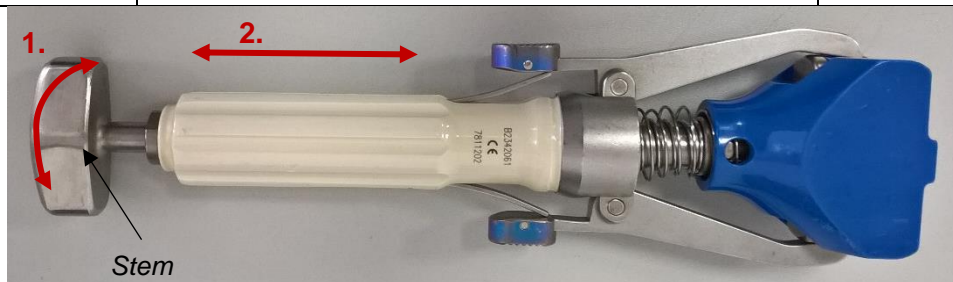

Steps for assembly/disassembly for cleaning

For the cleaning of the impactor/extractor, the disassembly is **obligatory**:

1. Unscrew the stem
2. Take it out from the body;
3. Clean each part separately;
4. Assemble the set by screwing it.